

7.1.2 สถานพยาบาลมีคู่มือขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นของระบบเรียกพยาบาล

1. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์

- ดูว่าหน้าจอแสดงผลผิดปกติ
- ไฟหน้าห้องไม่ติดค้าง (แปลว่ายังไม่มีกรเรียกค้ำงอยู่)
- ลำโพงไม่มีเสียงผิดปกติ



2. การเรียกพยาบาล



- กด ปุ่มเรียกพยาบาล (Call Button) ที่หัวเตียงหรือรีโมต

- เมื่อกดแล้ว:

หน้าจอจะแสดงสถานะ “เรียกพยาบาล” หรือหมายเลขห้อง

ลำโพงจะมีเสียงแจ้งเตือน

ไฟหน้าห้องจะกระพริบและมีเสียงแจ้งเตือนดัง

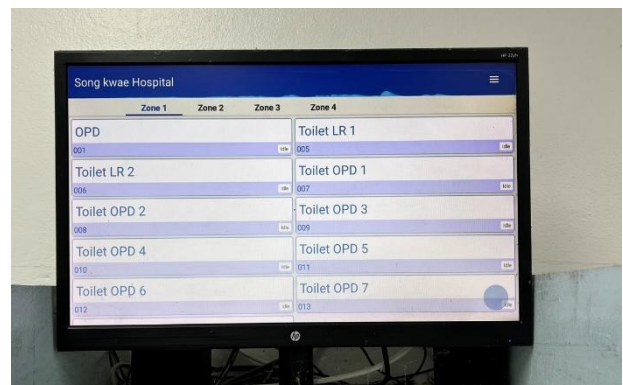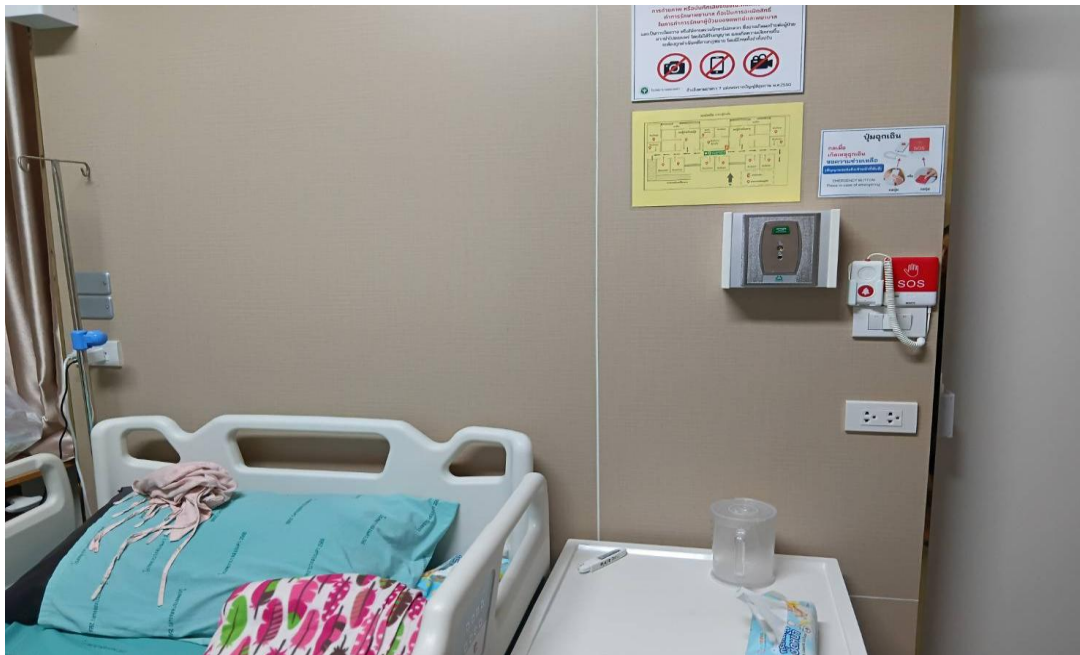

3. ระหว่างรอพยาบาล

- ผู้ป่วยควรอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย
- ไม่ต้องกดซ้ำหลายครั้ง (ระบบจะส่งสัญญาณแล้ว)

4. เมื่อพยาบาลมาถึง

- พยาบาลจะกด ปุ่มยืนยัน/รับสาย (**Cancel / Reset / Accept**)
- ระบบจะ:
 - หยุดเสียงลำโพง
 - ปิดไฟหน้าห้อง
 - หน้าจอกลับสู่สถานะปกติ

5. กรณียกเลิกการเรียกเอง

- กดปุ่ม “ยกเลิก (Cancel)”
- ตรวจสอบว่า:
 - ไฟหน้าห้องดับ
 - ไม่มีเสียงแจ้งเตือน

6. ข้อควรระวัง

- ห้ามกดเล่นโดยไม่จำเป็น
- หากปุ่มไม่ทำงาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
- ระวังสายหรืออุปกรณ์ตกหล่นเสียหาย

